


## Anvisning för Sharpak™ 6




### Öppnande av Sharpak™ 6

- Öppna locket till vertikalt läge.
- Tryck ner locket i bakkant för att låsa locket i öppet läge.

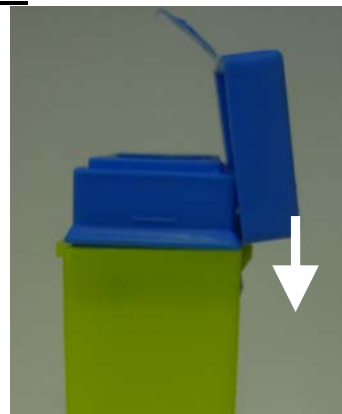

### Temporär stängning

- Lyft på locket.
- Stäng locket.
- Det ska höras ett klick.
- Kontrollera att kanylburken är stängd.

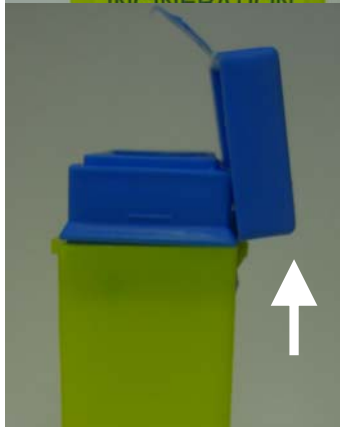

### Permanent stängning

- För ner fliken genom öppningen.
- Det ska höras ett klick.
- Kontrollera att kanylburken är stängd.



- Kanylburken är även försedd med en etikett på svenska.
- Observera att kanylburken ALDRIG ska fyllas över den streckade MAX linjen.
- Kanylburken innehåller smittförande kliniskt avfall.
- Vid olycka kontakta Räddningstjänsten, telefon 112.