

Checklista för hjärtstartare

Den här checklistan är avsedd att användas på alla hjärtstartare oavsett modell. Tänk på att alltid följa tillverkarens rekommendationer.

Kontrollera följande:

- Statusindikatorn – visar att hjärtstartaren är ok (självtester och batterier)
- Elektroder – utgångsdatum
- Kontrollera att det finns en sax, rakhyvel, liten handduk eller annat liknande, inblåsningsskydd och skyddshandskar tillsammans med hjärtstartaren
- Att ni har en hjärtstartarskylt vid hjärtstartaren och gärna också vid ingången till arbetsplatsen – så att det är lätt att hitta hjärtstartaren
- Att ni registrerat er hjärtstartare i hjärtstartarregistret www.hjartstartarregistret.se



**VI HJÄRTSÄKRAR
SVERIGE**

**KRIS &
HJÄRTA**