

## ”Dri-fi” Skvalpstopparen – för glas och mugg

Istället för pipmugg, sugrör eller specialanpassade glas



Dri-fi är en svensk uppfinning som är unikt framtagen för dig som vill kunna dricka ur ett vanligt glas eller kopp utan att känna oro för att spilla. Den passar lika bra för barn som ska lära sig dricka ur vanliga glas, eller för vuxna som är sängliggande eller skakar i händerna, som då kan använda vanliga glas/muggar istället för pipmugg.

Den anpassar sig till ditt dryckeskärl tack vare sina speciella mjuka vingar av nyckelhålskonstruktionen och passar glas/muggar som är 55-75 cm i diameter.

Man kan dricka alla sorters drycker, såväl varma som kalla, Kaffe, te, nyponsoppa, yoghurt dvs alla drycker som inte har fruktbitar el dyl. Överbliven dryck rinner tillbaka genom ett centralt hål. Dri-fi tillverkas i Sverige av livsmedelsgodkänd silikon. Den kan maskindiskas. Art nr 160001

### Användarinformation:

- Innan du använder den ska duen diskas i diskmaskin eller för hand med varmt vatten och diskmedel
- Dri-fin är endast avsett för användning i dryckeskärl och får inte användas till något annat exv. som leksak.
- Kolla regelbundet din Dri-fi så att inga skador uppstått. En skadad eller modifierad Dri-fi ska kasseras.
- När den ska sättas in i ett glas ta tag i greppet med tummen och pekfingeret och låt de andra fingrarna vila mot motsatt sida. Placera den i dryckeskärlet med en mild rörelse tills du känner att den greppar tag mot kanterna på innersidan. Din Dri-fi ska sitta vågrätt i glaset.



En Dri-fi kan användas till flera olika modeller av glas/muggar



Med Dri-fi kan man använda samma sorts glas som de andra matgästerna.

Dri-Fi kostar 125 kr + moms + frakt

Beställ dem via e-butiken på hemsidan [www.svedinrehab.se](http://www.svedinrehab.se)

Med e-post till [elisabeth@svedinrehab.se](mailto:elisabeth@svedinrehab.se) Eller skicka en beställning med post till adressen nedan.

Skriv alltid både leverans och faktura adress

Elisabeth Svedin Rehab

Borgargatan 18  
117 34 Stockholm

Telefon  
0709-69 52 69

[elisabeth@svedinrehab.se](mailto:elisabeth@svedinrehab.se)  
[www.svedinrehab.se](http://www.svedinrehab.se)

Plusgiro  
185431-4

F-skatt  
510715322201