

Skidor till rollator/rullstol

Under flera vintrar har dessa skidor gjort succe på barnvagnar
men de passar lika bra på rollatorers/rullstolars framhjul

Tillsammans med varje skidpar levereras 3 olika storlekar av byglar
som passar olika hjulstorlekar. Vid användning sätts de på snabbt och enkelt.



Se en film när skidorna är monterade på en rullstol

<http://youtu.be/IKbqc-YHmY0>



Skidor monterade på en Leber rollator

Inställning/montering av skidor på en rullstol/rollator första gången.

1. Trä på det korta och långa spännbandet på varsin sida av den bygel som passar i storlek till hjulen.
2. Vänd rollator/rullstols hjulet bakåt, och placera hjulet mot framkanten i den böjda formen.
3. Justera in bygeln i något av hålen så att bygeln är placerad bakom hjulet.
4. Fäll bygeln framåt över bakkdelen av hjulet så den stöder mot hjulet.
5. Spänn fast bygeln genom att föra det längre spännbandet genom öglan framför den böjda formen, stick in det i spännet på andra sidan och dra åt spännbandet så att hjulet sitter stadigt fast i skidan

Se en film som visar hur skidorna monteras på hjulen Klicka här: http://youtu.be/Z13H_gB9-r8

När denna inställning är gjord sätts skidorna snabbt och enkelt på/tas av rullstolen/rollatorn

Pris

433 kr + moms (fraktfritt inom Sverige) = summa 595 kr

Beställ dem genom att maila till elisabeth@svedinrehab.se
eller posta beställningen eller faxa, se adress/faxnr nedan (dock ej under juli månad)

Elisabeth Svedin Rehab
Borgargatan 18
117 34 Stockholm

Telefon
0709-695269
Plusgiro 185431-4

www.svedinrehab.se
elisabeth@svedinrehab.se
F-skattebevis 5107153222