

Bruksanvisning uppblåsbar Schamporing för hårtvätt i sängen

1. Blås upp schamporingen så att den blir hård och stäng ventilen.
2. Placera patienten så att huvudet är nära sängkanten, där du står för att tvätta håret.
3. Dra ner kudden så att den ligger under patientens skuldror och nacke och inte under huvudet.
4. Placera schamporingen under patientens huvud.
5. Se till att dränage-slangen hänger ner i en hink bredvid sängen utan något veck på slangen så att vattnet/schampot kan rinna ut utan hinder.
6. Använd en skölkanna för att väta/skölja håret. (En speciell skölkanna kan beställas från Svedin Rehab www.svedinrehab.se)
7. Efteråt måste allt schampo sköljas ordentligt från både schamporingen och slangen. Torka av den ordentligt och låt den ligga uppblåst tills den är alldeles torr (gärna några timmar) innan luften släpps ut. När all luft är urpressad så sätt tillbaka propfen i ventilen innan den viks ihop och läggs på förvaring.

PS/ Schamporingen kan även användas för nedre toalett. Men rengöringen och möjligheten för återanvändning blir då mer begränsad.

