

TF SOFT HÄL Art.nr. 130001
TRYCKAVLASTNING FÖR HÄL OCH UNDERBEN



Häl- och underbensmadrass som avlastar båda fötterna samtidigt på ett enkelt och komfortabelt sätt. Hälskyddet ger ett mjukt och skönt underlag för underbenet i ryggläge och sidoläge när fötterna behöver avlastning. Hälskyddet passar också utmärkt som underbensförhöjning för att motverka ödem vid bensår och för att ge en skön avlastning. Luftkärnan är 45 x 75 cm.

ANVÄNDARINSTRUKTION

Hälskyddet fylls med luft med hjälp av en handpump utan att den pumpas för hårt.



Stoppa in sidoflikarna under madrassens sidor så skyddet ligger stadigt fast.

OBS! Det är viktigt att hälskyddet placeras under lakanet.

Bädda underlakanet löst och slätt över hälskyddet.

Hälen läggs utanför vid hälsår och på vid förebyggande avlastning så att hela underbenet har stöd och avlastning. När patienten lagts i sängen kontrollera att det är tillräckligt med luft för att **hälen skall ligga fri** från underlaget och inte böttna, men att blåsan inte känns hård.

SKÖTSEL: Torka av med tvällösning och vatten, desinfektionslösning eller sprit. **OBS!** Vid blötläggning, ha proppen stängd för att inte få in vatten i madrassblåsan.

Tvätt av bomullsöverdrag: Maskin 80 grader C.

Om skada/små hål uppstått laga med Casco Kraft Universallim eller liknande som passar på polyuretan.

Material: Madrassblåsa i polyuretan, Överdrag 100% Bomull. **CE-märkt**

OBS Nytt pris från 2017-10-01

SOFT HÄL 475:- st, PUMP 60:- st, Extra överdrag 100:-st. + moms och frakt.