

# Rekonditioneringsanvisning Krabat barnhjälpmedel

Tillverkare:

Krabat AS

Ravnsborgveien 56

1395 Hvalstad

NORWAY

Tel: + 47 66 77 73 00

Faks: + 47 66 77 73 01

Web: [www.krabat.com](http://www.krabat.com)



Detalj	Kontroll	Åtgärd
Rörliga delar	Kontrollera att rörliga delar kan dras åt och är åtdragna ordentligt enligt anvisning.	Rengör rörliga delar, byt ev. ut defekta skruvar eller andra defekta delar.
Dynor	Inspektion av tyg.	Tvätta dynor i 40° maskintvätt, dropptorka.
Rengöring		Rengör produkten med vanligt förekommande rengöringsmedel utan slipmedel. Produkten klarar att sprit avtorkas att rengöras i 60° vatten. Använd ej klorrengöringsmedel eller andra aggressiva rengöringsmedel! Obs! Etiketter behöver täckas innan användning av rengöringsmedel eller rengöringssprit.
Plastdetaljer	Kontrollera att plastdetaljer inte har sprickor.	Byt vid behov ut defekta delar.

Detta är en allmän beskrivning av de punkter som bör kontrolleras när ett hjälpmedel rekonditioneras. Därutöver förväntar sig Krabat AS att den personal som arbetar med rekonditionering självständigt bedömer varje objekts tillstånd, så att eventuella skador eller funktionsstörningar som inte upptas i schemat åtgärdas innan objektet lämnas ut till ny användning.

Krabat AS kan inte ställas till ansvar för felaktiga underhålls- eller reparationsåtgärder från rekonditioneringspersonalens sida. Originalreservdelar från Krabat AS skall alltid användas.

Mer information finns i dokumentet "Återanvändning av Krabat Jockey och Sheriff"

Återförsäljare i Sverige:

**Svancare AB**

Alvägen 1

77141 LUDVIKA

Sverige

[www.svancare.se](http://www.svancare.se)