

Krabat Pilot

Bruksanvisning



Säkerhet

Lämna aldrig barnet i krypvagnen utan tillsyn av vuxen. En felaktigt använd produkt kan medföra risk för skada.

Kontrollera alltid att lårremmen är korrekt justerad.

Använd krypvagnen enligt rekommendationer från sjukgymnast.

Krabat Pilot är inte en leksak. Låt inte barn leka med den då det kan leda till att barnet eller krypvagnen skadas.

Vid ändring av produkten annat än justeringar enligt bruksanvisning och kombination med delar som inte är original skall CE-märkningen tas bort från produkten.

Allmän information



Krabat Pilot är ett hjälpmedel för positionering i knäfyrfota, förstadiet till krypande förflyttning. Produkten har en patenterad dynamik som lyfter höften så att knäna lättare kommer in under kroppen. Hur barnet ska använda krypvagnen bör bedömas av barnets sjukgymnast.

Den dynamiska lyfthjälpen i Krabat Pilot kan justeras efter barnets vikt och aktivitetsnivå. Höjden kan justeras steglöst och bålstödet kan justeras så att Krabat Pilot passar till barn i olika storlek mellan ca 1 och 5 år. Den optimala justeringen av höjd, styrka på gaskolven och längden på bålstödet provas ut individuellt. Låt inte barnet börja använda krypvagnen utan att den justerats.

Barn växer och ändrar rörelsemönster kontinuerligt. Regelbunden justering av hjälpmedlet kommer att behövas. Ta kontakt med barnets sjukgymnast om krypvagnen inte fungerar optimalt eller om du tror att det är nödvändigt med en justering.

Krypvagnens delar

1. Chassi
2. Mekanik
3. Polstrat bröst- och magstöd
4. Gasfjäder
5. Lår- och rumprem





Användning

Barnet placeras på mage i Krabat Pilot. Remmen som sitter i bröststödet bakkant spänns mellan benen, runt lår och rumpa och spänns fast i bröststödet. Remmen justeras efter barnets rörelsemönster genom att strama åt eller släppa efter. Kontrollera så att remmen inte är så stram att låren kläms mot bröststödet. Barnet ska kunna röra sig fritt. Ha uppsikt över barnets fingrar så det inte klämmer sig vid användning.

Sjukgymnast kan ge vägledning i hur barnet kan få guidning av vuxen i Krabat Pilot. Ofta kan det vara fördelaktigt att stå bakom barnet och guida det till fyrfotaställning och krypning. Krabat Pilot ger möjligheter till träning i ställningar som många barn inte klarar att själv komma till.

Individuella justeringar

När barnet växer ändras behoven med tanke på storlek och vikt. Kontakta sjukgymnast när krypvagnen inte längre fungerar optimalt. Det är ett tecken på att det behövs justering.

Höjjustering av bröststöd

Höjden justeras genom att M5 skruven lossas med medföljande insexnyckel som du finner på undersidan av chassit. Ställ in bröststödet på önskad höjd och dra åt skruven ordentligt. Nedre spåren indikerar max höjd.



Längdjustering av bröststöd

Främre delen av bröststödet kan fästas i två positioner. Ta bort den främre polstringen och lossa fyra M4 skruvar. Fäst bröststödet i alternativt hålmönster.

Bakre brättet kan fästas i tre positioner. Lossa fyra M5 skruvar på var sida med den medföljande insexnyckeln. Fäst i önskat hålmönster.



Justering av bröststödet främre del.

Justering av bröststödet bakre del



Olika inställningar av bröststödet.

Justering av gasfjäder

Gasfjädern kan ställas in i tre positioner. Det översta hålet ger minst lyftkraft och det nedersta mest. Använd medföljande insexnyckel, som du finner under chassit och fäst gasfjädern i önskad position.



Justering för maximal lyfthjälp.

Justering för medel lyfthjälp.

Justering för minst lyfthjälp.

Justering av lår- och rumprem

Remmen har snäpplås som förenklar barnets placering i krypvagnen. Längden justeras vid fästet i snäpplåset.



Tillbehör - Krabat Co-Pilot

Vi rekommenderar att Krabat Pilot används tillsammans med Co-Pilot som både skyddar knäna och ger positionering av benens position. Dessa är utvecklade för att optimera barnets funktion i Krabat Pilot. De ger god friktion mot parkett och andra golvbeläggningar. Krabat Co-Pilot (en storlek) används utanpå vanliga kläder och justeras i storlek med karborrelåsningen.

Krabat Co-Pilot består av ett för knäskydd för vardera ben som kan kompletteras med en gummikord som löper till krypvagnens chassi. Denna gör att barnet hjälper sig själv till att krypa i ett reciprokt/växelvis krypmönster. Fästet för montering gummikorden är olika för modell före 2015 (se bild) och modell 2015 och framåt är ersatt med en ögla som skruvas i härför avsett hål på chassit. För att minimera abduktion kan även en gummikord mellan knäskydden användas. Använd medföljande M5 skruv för montering av Co-Pilot.



Krabat Co-Pilot



Medföljande insexnyckel under chassi.



Montering av Co-Pilotens gummikord.



Karborrelås



Gummikord för att minska abduktion

Tillbehör - Ryggrem

Ryggremmen är justerbar (en storlek) och har snäpplås. Den fästs i två slitsar i bröststödet.



Ryggrem



Fäste av ryggrem i bröststöd.



Justering av ryggremmens längd.

Väst

Västen (en storlek) fästs med fixlocklås. Använd medföljande skruvar för att fästa dessa under bröststödet. Barnet kan lätt placeras med västen genom att använda snäpplås och längden på remmarna kan justeras vid de fyra snäpplåsen i västen.



Underhåll och skötsel

Alla metall- och plastdelar rengörs med vatten och några droppar mildt rengöringsmedel. Bröststödet polstring torkas av med vatten och mildt rengöringsmedel. För att säkerställa att krypvagnen rullar lätt, se till att hjulen hålls fria från damm, hår etc.

Kontrollera regelbundet att det inte är skador och slitage som kan medföra säkerhetsrisk.

Ändringar eller anpassningar ska utföras av kvalificerad personal. Gör under inga omständigheter anpassningar av produkten på egen hand.

Krabat Pilot är CE-märkt. Det är en garanti för att produkten uppfyller europeiska säkerhetskrav enligt EN12182.

Hållbarheten på produkten beräknas till ca 5 år vid normalt bruk. Därefter kan produkten renoveras av Krabat AS eller godkänd samarbetspartner.

Försäljning i Sverige:

Svancare AB

Alvägen 1

771 41 Ludvika

Tel: 0240-10102

E-post: info@svancare.se

Web: www.svancare.se

Tillverkare:

Krabat AS

Ravnborgsveien 56

1395 Hvalstad

Norge

Web: www.krabat.no

2020-03-03