

V-TRAK Rekonditionering, underhåll och rengöring

V-Trak produkter är konstruerade för lång livslängd och för att ge stora möjligheter till anpassning. Dessa egenskaper bidrar till låga kostnader.

Underhåll och rengöring

Klädsel – klädseln är den del som utsätts för störst slitage. För bästa anpassning till brukaren behöver den vara elastisk och kan inte göras för styv.

Klädseln kan tas av för tvättning och kan ersättas vid behov. Skummet i ryggstödet kan inte tvättas men kan bytas ut.

Tvättråd klädsel – Ryggstödet klädsel kan tvättas enligt instruktionerna på etiketten på den specifika produkten eller nedan:



Rengöring ryggens skal- Plastskalet torkas av med en fuktig trasa. Doppa inte metallkomponenter i vatten och se till att skalet är torr innan skum och klädsel sätts på.

Den bakre delen av skalet ska kontrolleras för tecken på skador.

Kontroll av slitage - Kontrollera regelbundet för slitage på ryggstödet. Kontrollera så det inte är några hårda kanter på baksidan eller sprickor i skummet. Om något är slitet eller trasigt kan klädsel, interna band och skum lätt bytas ut. Ryggstödet kanter kontrolleras noga där skalets kant kan kännas genom skummet. Om skummet är skadat utsätts användaren för risk att skada sig.

Rekonditionering och byte av delar

För att förlänga livslängden av produkten V-Trak, är ytterklädsel och skumpolstring lätta att byta ut och finns tillgängliga som reservdelar.

Rengör ryggen enligt instruktioner ovan.

Om vingarna på ryggstödet har justerats inåt för stöd på thorakal och /eller bäcken nivå, bör justerskruvarna helt lossas för att tillåta skalet att återgå till sin ursprungliga form.

Utbyte av eventuella defekta delar kommer att garantera många års användning och ytterligare minska kostnaderna för ägande.

Byte av klädsel – för att beställa överdrag/klädsel använd prefix CV -___ Kom ihåg att inkludera produktspecifika artikelbenämningar för ryggstöd efter CV exempelvis CV-AXSBD-SF.

Byte av skum - skummet på V-Trak ryggstöd kan inte tvättas och det bör bytas ut om det har förorenats. Skummets hållbarhet kommer att variera kraftigt beroende på användningsmönster. Nuvarande modeller har "clip-on" skum som man kan knäppa loss för enkel borttagning. Varje förändring i färg är inte nödvändigtvis ett tecken på slitage. **För att beställa ryggstödsskum använd prefix -CF -___** Kom ihåg att inkludera produktspecifika artikelbenämningar för ryggstöd efter CF t ex CF AXSBD-SF.

Byte av spännanordning/remmar – ryggstödet remmar och deras spännanordning kan bytas ut. Detta kommer att kräva avlägsnande av skummet och klädsel och ev ytterligare info från bruksanvisningen. **För att beställa nya remmar använd prefix ST -___** Kom ihåg att inkludera produktspecifika artikelbenämning för ryggstöd efter ST, exempelvis ST AXSBD-SF.