

V-trak rullstolsryggar – en översikt

Allmänna fakta

V-trak passar för brukare som behöver extra stöd för bål, brukare som behöver tryckfördelning, vid accentuerad kyfos och lordos, snett bäcken, scolios, felställning vid MMC etc.

Max brukarvikt: 140 kg

Materialet är luftgenomsläppligt. Överdragen kan maskintvättas i 40 grader, lufttorkning.

Kan levereras komplett ”in a box”.

ISO-kod: 181003

Krocktestad och brandtestad.

Montering och anpassning

V-trak passar på de flesta manuella och elektriska rullstolar sittbredd 24-60 cm. Kombinationsavtal finns för de flesta rullstolsfabrikaten. Brukarens sittbredd, bålbredd och rygghöjd avgör val av storlek. Rullstolens bredd avgör endast längd på fästbeslag.

V-trak finns i 4 grundmodeller. Välj modell utifrån brukarens funktion. Alla modeller ger god stabilitet och kan anpassas till asymmetri. Digital modellväljare finns på www.v-trak.com. Den ger dig förslag på ryggar. Ryggen kan anpassas steglöst i höjd, djup, vinkel och rotation med brukaren sittande i stolen. Alla justeringar kan nås från baksidan (beroende på val av fästbeslag).

Välj fästbeslag utifrån rullstolsmodell och brukarens behov; V-trak enkelt fäste för montering på rullstolens tvärstag, V-trak original CMA vid svår asymmetri och V-trak Lite för en lägre vikt och enklare justering.

Modeller

1. **Standard:** är lika bred upptill som nedtill och har ställbart djup 0-9 cm. Finns i höjd 28-60 cm. Kan justeras för att kompensera för asymmetri eller för olika sittbredd/bålbredd.
2. **Profil:** har asymmetrisk form med en smalare och en bredare del som kan vändas upp eller ner efter behov. Djup 0-9 cm. Höjd 30-40 cm. Lämplig när höftbredd och bålbredd är ungefär lika eller har mycket stor skillnad. Kan justeras för att kompensera för asymmetri.
3. **Djup profil:** har en asymmetrisk form med djup 9 cm i den smalare delen och 18 cm i den bredare. Finns i höjd 28-60 cm. Denna modell lämpar sig väl för de brukare som behöver mycket stöd i sidled.
4. **Segmenterad:** Segmenten används en eller flera i kombination.
 - standard, kan justeras till ett djup på 0-9 cm.
 - djup, kan justeras till ett djup på 0-18 cm.
 - ryggförlängareFinns i höjder 10-21 cm. Används då man önskar lågt ryggstöd för aktiva brukare, eller flera segment med vinklingsbart fäste emellan med möjlighet att kompensera för scolios, kyfos. Kan monteras med två fästbeslag för kompensation vid svår deformitet.

Tillbehör: förlängare, fäste för sele, huvudstöd och bålstöd.

Bredder


- XXS och XS, Small 26-33cm
- Medium 30-38 cm
- Large 35-43cm
- Extra Large 40-50 cm
- XXL 48-60 cm



Modell Segment-djup, med enkelt fäste i rullstolens horisontella stag.



Modell Standard med fästbeslag Original mellan rullstolens ryggrör samt Standard rygg med asymmetrisk justering.

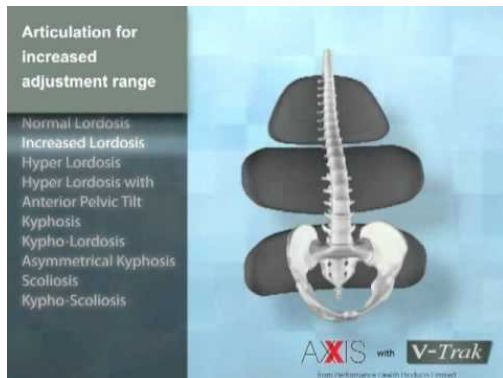

Modell Segment. Se fler justeringsmöjligheter på https://www.youtube.com/results?search_query=v-trak+wheelchair+backrest