

Krabat Sheriff S1 och S2

Montering sidoskydd

Sidoskydden monteras på hjulaxeln. Hjulbredden kan behöva justeras för att ge plats åt sidoskyddets fäste, se nedan eller bruksanvisning för Sheriff. Sidoskydden ska monteras med den blanka sidan inåt. Sidoskydden kan roteras steglöst i förhållande till sitsen för att anpassas till brukarens sittställning.

03.8

Justering av hjulbredd

Bredden mellan hjulen kan justeras genom att skruvarna lossas enligt fig 10, liksom skruvarna för tippskyddet på motsatt sida.



Fig. 10 Justering av hjulbredd