


BRUKSANVISNING

BIPPERN

- et bärbart
enureslarm...

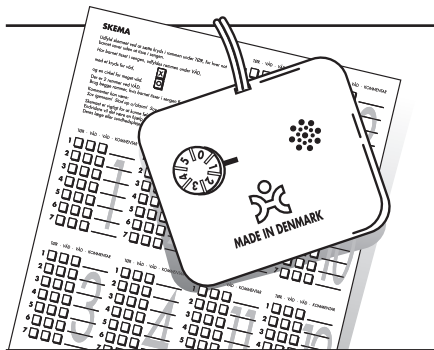

File no. 40208 S Rev.7-01

**Danish Care
Technology ApS**

www.danishcare.dk



BIPPERN är ett effektivt hjälpmedel till barn med primär nattlig enures.

En BIPPER består av:

- 1 BIPPER
- 1 kardborreband
- 2 plastklämmor
- 6 gröna clips
- 1 bruksanvisning
- 1 schema

Det är viktigt att barnet lär sig larmets funktioner, och vet hur BIPPERN sätts på och stängs av (se sid 4)

Let barnet prova att byta mellan batteritest (inställning 5) och av (inställning 0).

Kan barnet hantera detta, är det en god idé att själv sätta på BIPPERN och att forä schema.

Kom i håg att förvara larmet avstängt rent och torrt när det inte används, för att spara batteri.

1.

Placering

Kardborrebandet sys eller fistes på pyjamaströjan med hakarna. BIPPERN tas då snabbt av och på.



Plastklämma

Dra ledningen på insidan av pyjamaströjan och på utsidan av pyjamasbyxan.

Den svarta elektroden fästes på byxan framtill genom att man trycker ett grönt clips på insidan av byxan (jfr. strumpeband)

Elektrod



Clips



Clipsen SKALL sitta invändigt i byxan!

2.

BIPPERN väcker

Sitt på BIPPERN (1-4), sätt fast BIPPERN på pyjamasen enl. anvisning, därefter är barnet förberett att gå och ligga sig.

När BIPPERN väcker barnet stängs larmet av genom att vrida knappen till 0 = av. Därefter går barnet till toaletten och kissar färdigt.

För att få bästa resultat, är det viktigt, att barnet kommer upp, snabbast möjligt när BIPPERN larmar

Därefter sköljs elektroden (svarta knappen) av i varmt vatten, torkas torr och fästes i ett par torra pyjamasbyxor.

Tag loss elektroden genom att dra i tyget från båda sidor.




Undvik att dra i elektrod eller ledningen!

Det utgår ingen garanti på bruten elektrod eller ledning!

3.

Inställning

- 0 = Av
1 = Mest känslig
2 = Mindre känslig
3 = Känslig
4 = Mindst känslig
5 = Batteritest
- 1-4 er tændt.
Følsomheden vælges for at undgå vækning på grund af sved.

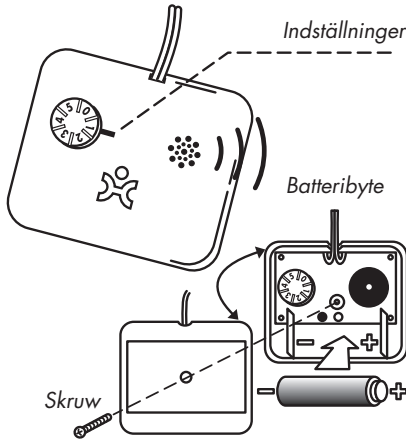

4.

Tips

Låd barnet sova i en oöm pyjamaströja - Plastklämmen kan göra små hål i tyget!

De första nätterna kan det vara bra att sova i samma rum som barnet för att hjälpa till att väcka och komma upp.

barnet bör bara väckas när larmet ringer. Målet med BIPPERN är att barnet är tort natten igenom - varje natt.

Det är ingen hjälp för barnet att sätta mål med belöningar. "Bara" 6 torra nätter, blir snabbt till en jobbig upplevelse ifall belöningen är satt till 7:e natten. Då skall "man ju börja om från början" igen! När behandlingen är avslutad förtjänar barnet naturligtvis en belöning.

Hindra inte barnet att dricka på kvällen, tvärtom är det bra att dricka de sista timmarna före sängdags.

BIPPERN skal användas varje natt under behandlingsperioden.

5.

Schema

bifogat schema som fylls i löpande, kan vara till hjälp för Er doktor/sköterska vis rådgivning samt avslutning af behandling.

Avslutning

Har barnet behandlats med BIPPERN 1 månad utan torra nätter bör behandlingen avbrytas. Kontakta Er läkare/sköterska för fortsatt rådgivning. Det tar olika tid att få blåskontroll på natten. Alla barn blir torra så småningom. Behandling med enureslarm hjälper till på traven.

10 - 15% av alle 6 åringer har enuresis nocturna (ofrivillig nattlig vattenavgång)

Andre produkter

Danish Care Technology ApS utvecklar även andra produkter for behandling av sängvätning. Bl.a Väkkeren med möjlighet att koppla till olika larmanordningar.

CE



Danish Care Technology ApS

Energivej 3 · DK4180 Sorø
Tlf.: +45 5850 0565 · Fax: +45 4696 4646
E-mail: info@danishcare.dk
Web: www.danishcare.dk

Återförsäljare:

SMIDI
Smidi AB

Box 24018 · 224 21 Lund
Tel. 046-211 10 04 · Fax 046-18 84 09
E-mail: direkt@smidi.se · Web: www.smidi.se

6.