

DianaTalks – Schnellstartanleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer **DianaTalks**, die sechs europäische Sprachen in einer einzigartig hohen Sprachqualität in sich vereint. **DianaTalks** sagt den Wochentag und die Uhrzeit wahlweise in digitaler oder in analoger Sprachform an (nicht gültig für die deutsche Sprache).

Sprachen: Deutsch, Spanisch, Englisch, Italienisch, Französisch und Niederländisch.

Wie man anfängt:

Ein- und Ausschalten – Ansage aktivieren:

Drücken Sie den **Sprachknopf** und **halten Sie ihn** für 3 Sekunden gedrückt, bis Sie zwei kurze Signaltöne hören. **DianaTalks** ist nun im aktiven Sprachmodus (Power on mode). Um **DianaTalks** in den Schlafmodus (Sleeping mode) zu schalten, halten Sie den **Sprachknopf** für 5 Sekunden gedrückt. Es ertönt ein einzelner Signaltöne. Diese Funktion schont zum einen die Batterien, zum anderen verhindert sie ein ungewolltes Auslösen der Ansage.

Einstellen der optischen Oberfläche:

Die Uhrenkrone befindet sich zwischen dem **Sprachknopf** und dem eingelassenen Funktionsknopf. Um die Uhrzeit korrekt auf der Anzeige für sehbehinderte oder sehende Personen einzustellen, ziehen Sie die **Krone** heraus, stellen Sie, wie bei einer gewöhnlichen Uhr die gewünschte Uhrzeit ein und drücken Sie die Krone wieder hinein.

Sprachen- und Wochentageeinstellung:

(Ein spitzes Werkzeug wie eine Zahn Picker oder ähnliches benötigt wird)

1. Sprache: **Halten** Sie den **Funktionsknopf für den Sprachen/Wochentag** 5 Sekunden gedrückt. **DianaTalks** sagt die Uhrzeit in der zuvor eingestellten Sprache (in den meisten Fällen Englisch). Wählen Sie nun, durch einfaches Drücken die gewünschte Sprache aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der **Sprachtaste**.
2. Einstellung des Wochentags: Drücken Sie den **Sprachen/Wochentagsfunktionsknopf** solange, bis **DianaTalks** Ihnen den gewünschten Wochentag sagt. Bestätigen Sie Ihre Auswahl wiederum mit der **Sprachtaste**.

Einstellen von Stunde und Minute im Sprachmodus:

1. Drücken Sie die **Stundenfunktionstaste** und lassen Sie sie wieder los. Stellen Sie so Schritt für Schritt die gewünschte Stunde ein. Jeder Stundenschritt wird angesagt.
2. Drücken Sie die **Minutenfunktionstaste** und lassen Sie sie wieder los. Stellen Sie so Schritt für Schritt die gewünschte Minute ein. Jeder Minutenschritt wird angesagt.

Um sich rascher durch die Stunden bzw. Minuten zu bewegen, **halten** Sie den Stunden- oder Minuten-Funktionsknopf gedrückt.

Digitale Ansage = "14.10"

Analoge Ansage (nicht in deutsch möglich) = "10 minutes past 2 in the afternoon"

Wechsel zwischen Analogem und digitaler Ansage:

In allen Sprachen, mit Ausnahme der deutschen Sprache, können Sie sich die Uhrzeit von **DianaTalks** entweder in analoger oder digitaler Form ansagen lassen. Um zwischen diesen Modi zu wechseln, und somit auch von der 12-Stunden-Ansage zur 24-Stunden-Ansage, drücken Sie solange die Stunden-Funktionstaste, bis Sie 00:00 erreicht haben. Jetzt stellt **DianaTalks** sich automatisch von einem Modus auf den anderen um.

