

Gebrauchsanweisung

PennyTalks (PT)

Ihr persönliches, sprechendes Markierungssystem mit gesprochener Benutzerführung und Sicherungsmöglichkeit.

Schnellstart:


Plazieren Sie ein selbstklebendes Etikett auf einen Gegenstand, den Sie markieren möchten.

Halten Sie die Sensorspitze auf das Etikett und nehmen Sie eine Beschreibung auf.


Spielen Sie Ihre Aufnahme ab, indem Sie die Sensorspitze erneut auf das Etikett halten.

1

Vorderseite

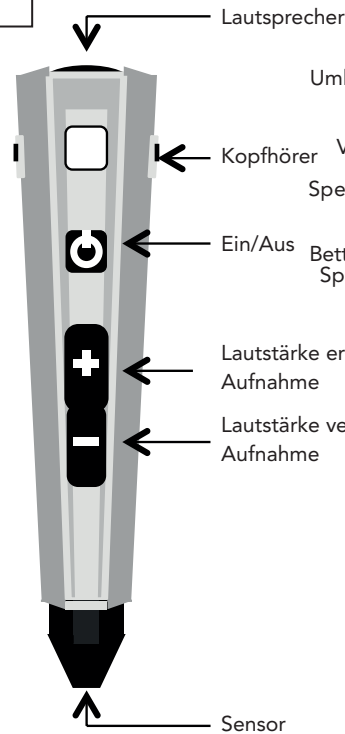


Rückseite

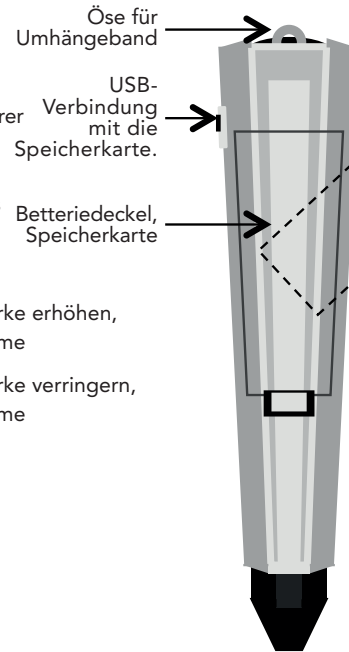

2

Die Speicherkarte befindet sich unter den Batterien:

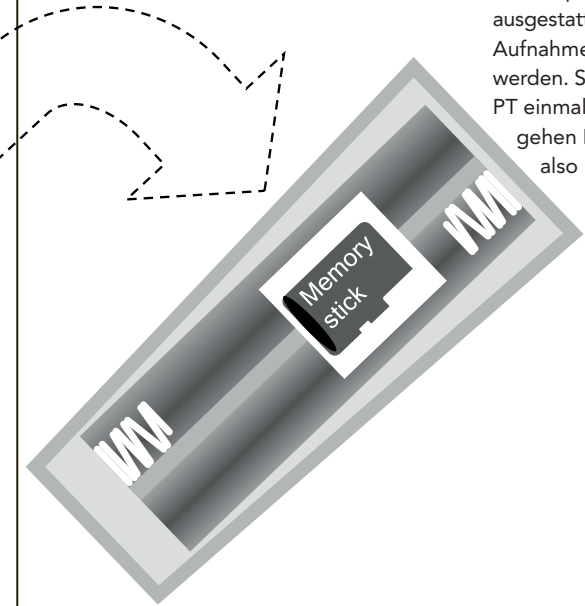

PT ist mit einer wechselbaren Speicherkarte ausgestattet, auf der alle Aufnahmen gespeichert werden. Sollten Sie Ihren PT einmal beschädigen, gehen Ihre Aufnahmen also nicht verloren.

3

Einstellen der Gerätesprache:

PennyTalks bietet Ihnen die Wahl zwischen 12 verschiedenen Sprachen.

Darüber hinaus ist auch ein Signaltone Modus verfügbar.

1. Drücken und halten Sie den Ein-/Aus schalter für 3 Sekunden.
2. Nehmen Sie die Sprachwahlkarte und wählen Sie die gewünschte Sprache aus.
3. Halten Sie den Sensor auf das Markierungsfeld für die gewünschte Sprache.
4. PT quittiert die Auswahl durch Ansage der Sprache, die nun gewählt ist.

4

Ein- und Ausschalten:

Legen Sie zunächst die Batterien ein. Halten Sie den Ein-/Aus schalter für 3 Sekunden gedrückt. Die Sprachausgabe sagt Ihnen jeweils an, ob das Gerät Ein- oder Ausgeschaltet wurde. Nach 60 Sekunden ohne Benutzung schaltet es sich automatisch ab.

Beschreibung für ein Etikett aufnehmen:

1. Berühren Sie das Etikett so lange mit dem Sensor, bis die Ansage: "Neues Etikett" ertönt.
2. Drücken Sie die + Taste oder die - Taste, bis der Beginn der Aufzeichnung angesagt wird.
3. Halten Sie die Taste solange weiter gedrückt, bis Sie Ihre Beschreibung aufgesprochen haben.
4. Lassen Sie die Taste wieder los.
5. Ihre Aufnahme wurde gespeichert.

Lautstärke:

Drücken Sie die + Taste zum Erhöhen oder die - Taste zum Verringern der Lautstärke.

5

Wiedergabe:

Halten Sie den Sensor in den markierten Kreis eines Etiketts. PT gibt nun die aufgezeichnete Beschreibung wieder.

Löschen einer Beschreibung:

1. Etikett mit dem Sensor berühren.
2. Die Aufnahme wird abgespielt.
3. Halten Sie + und - solange gleichzeitig gedrückt, bis das Löschen bestätigt wird.

Sie können nun neue Aufnahmen.

Lieferumfang:

2 Batterien AAA (nicht aufladbar)
USB-Kabel
Umhängeband
Kopfhörer
Selbstklebende, taktile Etiketten
Selbstklebende, taktile Etiketten für Kleidung. Geeignet für Waschmaschine und Trockner
Sprachwahlkarte

Technische Daten:

Batterien: 2 Stück AAA (Micro)
USB-Verbindung
Mitgelieferte Speicherkarte: bis zu 2700 Aufnahmen
Mit optionaler Speicherkarte: bis zu 90000 Aufnahmen